



## Produktübersicht

MUMIOFORM |GL| - Glanzlösung -glasklar-

MUMIOFORM |HE| - Hochglanz-Emulsion

MUMIOFORM |Modellon|

Mumioform Dentalprodukte  
Riedsteige 38  
72280 Dornstetten  
Tel: +49 (0) 7443 2258  
Fax: +49 (0) 7443 9643603  
E-Mail: [info@mumioform.de](mailto:info@mumioform.de)  
Internet: [www.mumioform.de](http://www.mumioform.de)

## MUMIOFORM |GL| - Glanzlösung-glasklar

Das perfekte Finish für die gesamte Kunststoffprothetik. Unsere Glanzlösung MUMIOFORM GL bietet ihnen unübertroffene Ergiebigkeit und ist mit seinem schnellen Einzug ideal für einen zeitsparenden Arbeitsablauf.

- Alle Kunststoffarbeiten bekommen einen tiefen und satten Glanz.
- Die Prothesenoberfläche erhält einen mikroskopisch feinen Schutz und eine intensive Abdichtung.
- Ihre Arbeiten erhalten durch dieses Präparat ein äußerst vorteilhaftes Aussehen.
- Einfache Anwendung: Auf die fertig polierte Arbeit werden ca. 4 - 5 Tropfen gleichmäßig aufgetragen. Nach ca. 30 Sekunden ist die Lösung eingetrocknet und die Oberfläche der Arbeit versiegelt.
- Höchste Ergiebigkeit! 100 ml genügen für die Bearbeitung von ca. 800 totale Prothesen.

100 ml 25,00 €  
250 ml 49,00 €

## MUMIOFORM |HE| - Hochglanz-Emulsion

Das perfekte Finish für die gesamte Kunststoffprothetik. Unsere Glanzlösung MUMIOFORM HE eröffnet Ihnen einen längeren Bearbeitungszeitraum für besonders zeitintensive Arbeiten.

- Alle Kunststoffarbeiten bekommen einen tiefen und satten Glanz.
- Die Prothesenoberfläche erhält einen mikroskopisch feinen Schutz und eine intensive Abdichtung.
- Einfache Anwendung: Auf die fertig polierte Arbeit werden ca. 7-8 Tropfen

gleichmäßig aufgetragen. Nach wenigen Minuten ist die weiße Emulsion verschwunden und die Oberfläche der Arbeit ist versiegelt.

- Die Arbeit erhält durch dieses Präparat ein äußerst vorteilhaftes Aussehen.
- 100 ml sind für ca. 400 totale Prothesen ausreichend.

100 ml 19,00 €  
250 ml 35,00 €

## MUMIOFORM |Modellon|

Unsere hochwertige Spezial-Isoliermasse für die Kunststoffprothetik in der Zahntechnik. Modellon dient als Abdruckmasse von der Wachsprothese, als Zwischenschritt für die weitere Verarbeitung der Prothese.

- Besitzt eine gute Formanpassung auf der Wachsprothese.
- Bleibt auf der Wachsprothese haften bis sie entfernt wird.
- Die Form des Abdruckes bleibt erhalten.

Anwendung: Anrührgefäß bis zum inneren, oberen Rand mit Masse füllen und 4 Tropfen Katalysator intensiv einmischen. Mit Pinsel oder Spatel auf die Zähne, - Interdental- und Zahnfleischpartien, auf die gut trockene Wachsprothese, auftragen. Retentionskörner auf die noch feuchte Masse streuen - nach Aushärtung der Masse kann der Gipsgegenguss angefertigt werden.

300 ccm 42,00 €  
500 ccm 79,00 €

Für umfassende Informationen über uns und unsere Produkte, sowie zu weiteren Produkten und aktuellen Angeboten besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter [www.mumioform.de](http://www.mumioform.de)

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Angaben in diesem Flyer sind ohne Gewähr.